



Аннотация по применению средства дезинфицирующего

«DGM Дезигард Экстра»

(составлено на основании инструкции по применению №16-12-01/1624 от 04.03.2019г.)

Химический состав	
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,15 %	
Бензалкониум хлорид 0,45 %	
Срок годности	5 лет

Антимикробная активность
Грам+ и грам- бактерии
Туберкулез (тест на M. Terraе)
Вирусы (тест на вирусе ранга "Г" по ФКР)
Дрожжевые грибы

Режимы применения средства «DGM Дезигард Экстра».

Объект обработки	Режим обеззараживания	Экспозиция, мин	Способ обработки
Основные режимы			
Поверхности в помещениях, мебель, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов, медицинские изделия, кувезы, наркозно-дыхательная и ингаляционная аппаратура, датчики УЗИ	Бактерицидный (кроме туберкулеза), фунгицидный, вирулицидный, туберкулоцидный	1	протирание, замачивание, погружение, орошение
Пищевые, медицинские отходы, биологические выделения		1	смешивание: 1 часть отходов к 5 частям средства